



**OEDER
DENTAL
STUDIO**

SEIT 1978

Pflegehinweise

Für Ihre **Oeder**Schiene

Oeder Dental Studio GmbH

Pater-Kilian-Straße 2
58802 Balve (Sauerland)

Telefon +49 (0) 2375 - 44 81
Telefax +49 (0) 2375 - 16 30

info@oeder-dentalstudio.de
www.oeder-dentalstudio.de

Für Ihre **Oeder**Schiene

Pflegehinweise

TÄGLICHE REINIGUNG

- Reinigen Sie Ihre Schiene möglichst vor und nach jedem Tragen
- Entfernen Sie Speichel und Rückstände mit ca. 50°C warmen Wasser
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihre Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel) Wir empfehlen astron DuraClean™
- Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden

HINWEISE

- Einfaches Einsetzen dank Memory-Effekt. Die Schiene passt sich perfekt an Ihre Zähne an und ermöglicht Ihnen ein einfaches und zeitsparendes Einsetzen
- Vor jedem Tragen für mindestens 20 Sekunden in ca. 50°C warmes Wasser legen

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie Ihre Schiene in der mitgelieferten Oeder-Schienenbox auf
- Bitte achten Sie darauf, dass die Schiene trocken ist und bei Raumtemperatur in der Schienenbox aufbewahrt wird

